



FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSMITTEL

Fugaten®

**Gebrauchsfertige Desinfektion auf Alkoholbasis zur
Schnell-Desinfektion für Flächen, Gegenstände
und Medizinprodukte**

**Désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool
pour une désinfection rapide des surfaces,
objets et dispositifs médicaux**



CE0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Fugaten®

Gebrauchsfertig

Zur gewerblichen Verwendung

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: 70 g Ethanol (vergällt)

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Schnell-Desinfektion von

- kleinen Flächen und Gegenständen (z. B. OP-Tische, Untersuchungsstühle)
- sonstigen alkoholbeständigen Materialien

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Unverdünnt anwenden!

Fugaten® aufbringen und mit trockenem Tuch verreiben.

Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen.

Wischdesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 mit Mechanik, geringe Belastung

bakterizid, levurozid	100 % – 60 s
-----------------------	--------------

Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie

begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 3/2017	100 % – 30 s
---	--------------

Rotavirus	100 % – 30 s
-----------	--------------

Papovavirus/Polyomavirus/SV40	100 % – 15 min
-------------------------------	----------------

EURO-Normen

EN 13624 (fungizid) geringe und hohe Belastung	100 % – 1 min
---	---------------

EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid), hohe Belastung	100 % – 30 s
--	--------------

EN 14476 begrenzt viruzid geringe Belastung	100 % – 30 s
--	--------------

EN 14476 begrenzt viruzid PLUS geringe Belastung	100 % – 1 min
---	---------------

EN 14476 viruzid geringe Belastung	100 % – 5 min
---------------------------------------	---------------

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Fugaten® ist leicht entzündlich!
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquelle fernhalten. Nicht rauchen.
- Ausbringung max. 50 ml/m².
- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei gut belüftet und trocken, nicht in der Nähe von Zündquellen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- wirkt bakterizid (inkl. Tbc) – fungizid – viruzid
- schnelle Wirkung und rasche Abtrocknung nach Desinfektion der Flächen und Gegenstände
- frischer Geruch
- gute Netzfähigkeit
- verträglich mit den meisten Materialien

Mode d'emploi

à lire attentivement!

Fugaten®

Prêt à l'emploi

Pour usage professionnel

PRINCIPES ACTIFS

100 g de Fugaten® contient: 70 g d'éthanol (dénaturé)

DOMAINES D'APPLICATION

Désinfection rapide

- des petits objets et petites surfaces (par ex. tables d'opération, chaises d'examen)
- appliquer seulement sur les matériaux supportant bien l'alcool

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Utilisation non-diluée seulement

Appliquer Fugaten® sur les objets et essuyer avec un chiffon sec.

Les surfaces et les objets doivent être entièrement mouillés.

Désinfection par essuyage conformément aux méthodes de la VAH de 2015, avec effet mécanique, contamination organique faible

bactéricide, levuricide	100 % – 60 s
-------------------------	--------------

Tests conformément aux directives de DVV/RKI

efficace vis-à-vis des virus enveloppés (VHB/VIH/VHC inclus) conf. aux recommandations du RKI de 3/2017	100 % – 30 s
---	--------------

rota virus	100 % – 30 s
------------	--------------

papova virus/polyoma virus/SV40	100 % – 15 mn
---------------------------------	---------------

Normes européennes

EN 13624 (fongicide) contamination organique faible et importante	100 % – 1 mn
--	--------------

EN 14348 (tuberculicide, mycobactéricide), contamination organique importante	100 % – 30 s
--	--------------

EN 14476 virucide vis-à-vis des virus enveloppés, contamination organique faible	100 % – 30 s
---	--------------

EN 14476 virucide vis-à-vis des virus enveloppés PLUS, contamination organique faible	100 % – 1 min
---	---------------

EN 14476 virucide contamination organique faible	100 % – 5 mn
---	--------------

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

- Fugaten® est facilement inflammable.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Quantité max. à pulvériser: 50 ml/m² aire de la pièce.
- Conserver le désinfectant au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé, loin des sources d'ignition et hors de la portée des enfants.
- Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.

PROPRIÉTÉS

- bactéricide (BK inclus), fongicide, virucide
- efficacité et séchage rapides après la désinfection des surfaces et des objets
- odeur fraîche
- bon pouvoir tensio-actif
- bonne compatibilité avec la plupart des matériaux

BESONDERE HINWEISE

- a) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch
Fugaten® ist reizend bei Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen, Darm etc.). Als Sofortmaßnahmen bei solchen Reizungen wird die Verdünnung des Präparates empfohlen. Bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit sonstigen Schleimhäuten reichlich mit Wasser spülen. In jedem Falle ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- b) Sonstiges: Kein Kontakt mit alkoholempfindlichen Materialien (Lackierungen, Beizungen, Plexiglas u.a.).
- c) Fugaten® sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zertifiziert und in den einschlägigen Listen aufgeführt.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

	Art.-Nr.
10 x 500 ml-Flasche inkl. Sprühkopf	2059
12 x 1-Liter-Flasche	9685
12 x 1-Liter-Flasche mit Sprühkopf	2294
12 x 1-Liter-Flasche (unparfümiert)	2299
12 x 1-Liter-Flasche mit Sprühkopf (unparfümiert)	2273
2 x 5 Liter-Kanister	9826
2 x 5 Liter-Kanister (unparfümiert)	9824

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

- a) Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte:
Au cas où Fugaten® viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter un médecin immédiatement. Dans ce cas, diluer le produit sans attendre en faisant boire une quantité d'eau importante au patient. En cas de contact avec d'autres muqueuses, rincer abondamment à l'eau. Dans tous les cas consulter un médecin.
- b) Observations particulières: Ne pas utiliser sur les matières sensibles à l'alcool (laques, vernis, plexiglas etc.)
- c) Utiliser Fugaten® en toute sécurité. Lisez l'étiquette et le mode d'emploi.

Ce produit est certifié conforme et figure sur les listes appropriées.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

	no d'article
10 x flacons de 500 ml (vaporisateur inclus)	2059
12 x flacons de 1 litre	9685
12 x flacons de 1 litre avec vaporisateur	2294
12 x flacons de 1 litre (sans parfum)	2299
12 x flacons de 1 litre (sans parfum) avec vaporisateur	2273
2 x 5 litres (bidons)	9826
2 x 5 litres (bidons), sans parfum	9824

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerion aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefon +49 30 77992-0, Telefax +49 30 77992-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG

Dorfstr. 26a, 5210 Windisch
Telefon +41 56 4416981, Telefax +41 56 4424114
www.lysoform.ch