TECHNISCHE INFORMATION



FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL

BUDESIN M

VAH-gelistet (DGHM)





Art.-Nr. 142.632 10-I-Kanister Art.-Nr. 142.633 6 x 1-I-Flasche

- aldehydfreie Flächendesinfektion harter Flächen und Einrichtungen im Krankenhaus, Altenheim und allg. Praxis
- besonders wirtschaftlich
- verfügt über ein breites Wirkungsspektrum gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren, einschl. HBV- und HIV-Viren, BVDV(HCV)-, Vaccinia- und Noroviren, MRSA-wirksam und getestet

ANWENDUNGSBEREICH:

Universelles Flächendesinfektionsmittel mit einer neuartigen aldehyd- und phenolfreien Wirkstoff-Formulierung. Schnell und

umfassend bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend, inkl. HBV/HIV. Wirksam gegen BVDV(HCV)- und Vaccinia-Viren und Noroviren. MRSA-wirksam und getestet. Besonders hautverträglich und wirtschaftlich. Keine Geruchsbelästigung.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

0,25 % = 4 Std.; 0,5 % = 1 Std.; 1,0 % = 30 min; 1,5 % = 15 min.

Bei Noroviren 2 % = 2 Std. Gutachten anfordern.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: transparente Flüssigkeit Geruch: aromatisch Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1,0 g/I pH-Wert im Konzentrat: 4

INHALTSSTOFFE:

Enthält: Duftstoffe Weitere Angaben: in 100 g Budesin M sind 8 g Didecyldimethylammonium-

chlorid und 2,5 g Polyhexamethylenbiguanid HCl als

Desinfektionswirkstoff enthalten

Giscode: GD 30

5-15 %: kationische Tenside, nichtionische Tenside,

für den Privatbereich

Haltbarkeit:im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost u. Hitze schützen

KENNZEICHNUNG:



GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut. S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser

abspülen und Arzt konsultieren.

S 28. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung S 36/37:

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung S 46:

oder Etikett vorzeigen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10 D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 Fax +49 (0) 5223 9970-50 info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15 CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 78686-68 Fax +41 (0) 44 78686-69 info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der **BUDICH GRUPPE**