

D-86

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- gebrauchsfertig
- rückstandslos
- parfümfrei

Wirkungsspektrum:

bakterizid (inkl. MRSA) tuberkulozid,
levurozid, fungizid, begrenzt viruzid
Geprüft nach VAH-Richtlinien.

Anwendungsbereiche:

Krankenhäuser, Seniorenresidenzen und Pflegeheime, Arztpraxen, Hotels und Gastronomie, Sanitär- und Schwimmbadbereiche, Tierheime

Anwendung:

Nicht auf erwärmte bzw. heiße Flächen sprühen.
Vor Anwendung sollten die Flächen an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit geprüft werden.
Nicht für die Instrumentendesinfektion oder OP-Bereiche.
Das Produkt nur im Konzentrat anwenden und mindestens 1 Minute einwirken lassen.
Bei hoher Eiweißbelastung 5 Minuten einwirken lassen und Flächen jeweils über den gesamten Zeitraum feucht halten.

Einwirkzeit:

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH: 1min
Wirksam gegen behüllte Viren, wie Vaccinia, BVDV/
HCV/HBV/HIV/Influenza-/Grippe-Viren
(begrenzt viruzid gem. RKI/DVV): 30 Sek.
Rotaviren: 30 Sek.
Noroviren (MNV, EN 14476): 1 Min
Tuberkulozid (M.terrae): 30 Sek.
Mykobakterizid (M.avium): 1min

BAuAReg.-Nr. N-86891

Technische Daten	Form	Farbe	Geruch	pH-Wert	Kennzeichnung
D-86	flüssig	klar	charakteristisch		siehe Sicherheitsdatenblatt