


TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

FLÄCHENDESINFektionsMITTEL

BUDESIN U VAH-gelistet (DGHM)

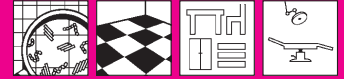

Art.-Nr. 142.512 10-l-Kanister

- Flächendesinfektionsmittel für **alle** abwaschbaren Flächen und Gegenstände wie im Krankenhaus, in der allg. Praxis, Schwimmbädern, Solarien und Saunen
- **besonders** wirtschaftlich
- verfügt über ein **breites** mikrobiozides Wirkungsspektrum
- **wirksam** gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren einschl. HBV- und HIV-Viren

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Desinfektion aller Flächen, Einrichtungen und Gegenständen im Krankenhaus und in der allgemeinen Praxis, Schwimmbädern, Solarien, Saunen.

DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:

| Harte Oberflächen | | Rohes Holz kontaminiert mit Pilzen | | Acrylglas o. ä. Flächen | |
|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Konzentr. | Einwirkzeit | Konzentr. | Einwirkzeit | Konzentr. | Einwirkzeit |
| 7,5 % | 1 Min. | 2,0 % | 1 Std. | 7,5 % | 1 Min. |
| 5,0 % | 5 Min. | 1,5 % | 4 Std. | 5,0 % | 5 Min. |
| 2,0 % | 15 Min. | - | - | - | - |
| 1,0 % | 1 Std. | - | - | - | - |
| 0,75 % | 4 Std. | - | - | - | - |

Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden. Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise beachten. **Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.**

| Konzentration in % | ml auf 1 l Wasser | ml auf 8 l Wasser (ca. 1 Eimer) | ml auf 10 l Wasser |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 0,25 | 2,5 | 20 | 25 |
| 0,5 | 5 | 40 | 50 |
| 0,75 | 7,5 | 60 | 75 |
| 1 | 10 | 80 | 100 |
| 1,5 | 15 | 120 | 150 |
| 2 | 20 | 160 | 200 |
| 3 | 30 | 240 | 300 |
| 4 | 40 | 320 | 400 |
| 5 | 50 | 400 | 500 |
| 7,5 | 75 | 600 | 750 |


TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
 Geruch: produktspezifisch
 Viskosität: dünnflüssig
 Dichte: 985 g/l
 pH-Wert im Konzentrat: 7

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: kationische Tenside
 Weitere Angaben: in 100 g Budesin U sind 3,35 % Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,35 % Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 3,35 % Alkyldimethyl-ethylbenzylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoffe enthalten
 Giscode: GD 0
 Zulassungs-Nummer: N-11974 · zugelassen als Desinfektionsmittel für den Privatbereich.
 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 3 Jahre, vor Hitze schützen

KENNZEICHNUNG:

| | |
|--|--|
|  Xi - Reizend | <p>GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:</p> <p>R 38: Reizt die Haut. R 41: Gefahr ernster Augenschäden. S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.</p> |
|--|--|

TRANSPORT: UN-Nummer: 1993 / Bez.: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Isopropanol solution) / Klasse: 3
 Verpackungsgruppe: III / ADR

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale
 Dieselstraße 10
 D-32120 Hiddenhausen
 Fon +49 (0) 5223 9970-40
 Fax +49 (0) 5223 9970-50
 info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International
 Firststrasse 15
 CH-8835 Feusisberg
 Fon +41 (0) 44 78686-68
 Fax +41 (0) 44 78686-69
 info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

**Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE**