



DESIFOR- QUICK PLUS wipes

TÜCHER ZUR SCHNELLEDESINFEKTION

EINSATZBEREICH

Gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen, für die Lebensmittelindustrie, Küchen und Gastronomiebetriebe (z. B. Tische). Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten. Gem. Biozidrichtlinie: Zur reinigenden Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders gut geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen, Wirtshaustische und anderen Bewirtungsflächen in der Gastronomie.

ANWENDUNG

Flächen, Inventar, Gegenstände mit DESIFOR-QUICK PLUS WIPES sorgfältig abreiben – Einwirkzeiten beachten.

Nachfüllen Dose: Deckel der Spenderdose abnehmen. Nachfüllbeutel 120er Pack öffnen, aus diesem Beutel eine Rolle formen und Beutel inkl. Inhalt in die Spenderdose gleiten lassen. Aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel der Spenderdose ziehen und Deckel wieder auf die Dose setzen. Nach Anbruch Tücher baldmöglichst verbrauchen. Nachfüllen QUICK-POCKET: DESIFOR-QUICK PLUS wipes 40er Pack "pocket" komplett durch die rückseitige Öffnung in die QUICK-POCKET stecken, so dass das Verschluss-Etikett von der Entnahmeöffnung der QUICK-POCKET aus zu bedienen ist. Nach jeder Tuchentnahme Verpackung wiederverschließen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.

WIRKUNGSSPEKTRUM DESIFOR-QUICK PLUS

Einsatzbereich	Einwirkzeit	Anmerkung
VAH-Liste, ohne Mechanik, hohe Belastung Bakterizidie und Levurozidie	konz. 5 Min.	lt. Gutachten wirksam nach 1 Min.
DVG-Liste für den Lebensmittelbereich Teil A (10 °C und 20 °C) und Teil C Bakterizidie und Levurozidie	konz. 5 Min.	Belasteter und wenig belasteter Bereich
Begrenzt viruzid – alle behüllten Viren z. B. HBV/HIV, HCV, Influenza	konz. 30 Sek.	gem. RKI-Empfehlung 1/2004
Noroviren (MNV)	konz. 1 Min.	gem. EN 14476

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bietet alle Vorzüge des Wirkungsspektrums von DESIFOR-QUICK PLUS
- Ohne Farb- und Duftstoffe, bestens für sensible Bereiche
- und die Lebensmittelindustrie geeignet
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung für DESIFOR-QUICK PLUS liegt vor
- Rückstandsfreie Schnelldesinfektion
- Praktische Dose/QUICK-POCKET zur Einzeltuchentnahme
- Ökonomische Nachfüllbeutel (120er Pack für Dose; 40er Pack "pocket" für QUICK-POCKET)
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

HINWEIS

Leichtentzündlich. Behälter dicht verschlossen halten.
 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
 Gebrauchte Tücher fachgerecht entsorgen, nicht in die WC-Schüssel werfen.

WIRKSTOFFE

100 g Tränkflüssigkeit DESIFOR-QUICK PLUS
 enthält 45,0 g Ethanol

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Karton mit 12 Dosen
 à 120 Tücher (120er Pack) Art.-Nr. 20554

Karton mit 12 Nachfüllbeutel
 à 120 Tücher (120er Pack) Art.-Nr. 20553

Karton mit 24 Nachfüllbeutel
 à 40 Tücher
 (40er Pack) "pocket" Art.-Nr. 20552

ZUBEHÖR

QUICK-POCKET Täschchen
 für 40er Pack "pocket"
 Karton mit 10 QUICK-POCKET Art.-Nr. 80030

Kennzeichnung nach GefStoffV: F, leichtentzündlich
 Produktcode GD 0
 baua: Reg.-Nr. N-35553; N-35554

CE 0482

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch
 stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten
 Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
 daraus nicht abgeleitet werden. 06/12